

**■ YESO MOUNTING**

Yeso piedra especial para confección de modelos de estudio en ortodoncia. Modelos con el máximo detalle y finura. Su color blanco nieve permanece inalterable. tipo III (Norma ISO-6873), de alta calidad.

**■ ESPECIFICACIONES**

YESO MOUNTING	
<b>Apariencia</b>	POLVO COLOR BLANCO
<b>Vicat Manual</b>	3 A 4 MIN
<b>Tiempo de Trabajo</b>	1 A 2 MIN
<b>Granulometría</b>	Retenido sobre tamiz: 300 micrones menor que 0.2% - 150 micrones menor que 2%
<b>Resistencia a la compresión (48Hs)</b>	6500 PSI
<b>Expansión Lineal 2 Hs.</b>	0.06%

**■ RECOMENDACIONES PARA SU PREPARACION**

Se aconseja trabajar con una consistencia del 30 % de agua. Temperatura de trabajo de 18 / 22°C.. Mezclado Manual: 30 seg.

Verter el polvo sobre el agua desmineralizada según la proporción recomendada. La consistencia inicial de mezcla debe ser densa. En este punto no añadir más agua de la recomendada.

A medida que se completa el tiempo de mezcla el producto adquiere la fluidez y estabilidad adecuadas.

Completado este tiempo de mezcla, la masa adquiere una consistencia suave y altamente tixotrópica, fluyendo fácilmente sobre el molde con una suave vibración o con pequeños golpes sobre la cubeta.

El agua de la red pública puede afectar el correcto proceso de fraguado del yeso, acortándolo o retardándolo.

**■ ENVASADO**

En bolsas de polipropileno de 1 / 15 Kg.

**■ ALMACENAMIENTO**

En cualquier lugar protegido del agua, de la humedad, y mantenido en sus envases originales.